

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Seitensicherung ist ein Zubehörteil, das entwickelt wurde, um das Herausfallen von Personen aus dem Bett während der Pflege im Krankenhaus oder zu Hause zu verhindern bzw. den Benutzer beim Aufstehen zu unterstützen. Sie wurde außerdem entwickelt, um den Benutzer beim Aufrichten, Bewegen oder Sitzen auf/in dem Bett zu unterstützen.

VORSICHT (!):

- Im Falle einer Beschädigung oder Fehlfunktion Ihres Produktes benutzen Sie das Produkt NICHT und wenden Sie sich bitte an einen autorisierten und geschulten Vertreter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke, die nicht in diesem Handbuch angegeben sind.
- Die MOBIAG AG übernimmt keinerlei Verantwortung für Folgen, die sich aufgrund einer falschen Verwendung dieses Produkts bzw. aufgrund einer nicht genehmigten Veränderung des Rahmens des Produkts ergeben.
- Die MOBIAG AG behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Abweichungen von $\pm 3\%$ bei den Abmessungen der Produkte möglich.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

- Wenn Sie dieses Handbuch nicht lesen, sollten Sie dieses Produkt bzw. ein anderes verfügbares Teil nicht verwenden. Sollten Sie die Verwendung bzw. die Vorsichtsmaßnahmen nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder die zuständige technische Fachkraft, bevor Sie das Produkt verwenden, da es anderenfalls zu Schäden kommen kann.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern.
- Verwahren Sie dieses Dokument für den späteren Gebrauch.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind, und lassen Sie die Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung.
- Besondere Vorsicht ist immer dort geboten, wo sich bewegliche Teile befinden, die Gliedmaßen einklemmen und Verletzungen verursachen können.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt an abnehmbaren Teilen anzuheben.
- Verwenden Sie den Sitz des Produkts ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Das Produkt ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht einer Person zu tragen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Wir tragen die alleinige Verantwortung für die Feststellung, dass die in dieser Erklärung genannten Medizinprodukte in die Klasse mit geringem Risiko (Klasse I) einzustufen sind und den Anforderungen der Verordnung 745/2017 der Europäischen Union und gegebenenfalls den genannten Normen und Gesetzen entsprechen.

MELDUNG VON VORFÄLLEN:

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich in Zusammenhang mit der Nutzung des Produkts ereignet, ist dem Hersteller und einer zuständigen Behörde des Mitgliedstaates zu melden, in dem der Benutzer bzw. Patient seinen Wohnsitz hat.

VOR DER VERWENDUNG:

- Prüfen Sie, ob der Rahmen beschädigt ist, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten (Rahmen weist keine Risse oder Brüche auf).
- Verwenden Sie das Produkt im Falle einer Beschädigung nicht und wenden Sie sich für weitere Anweisungen an Ihren Händler.
- Prüfen Sie, ob das Produkt richtig montiert ist und alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie stets den Verschleißzustand der mechanischen Teile, um den absolut sicheren Gebrauch des Produkts für Personen und Gegenstände zu gewährleisten.

**UMWELTSCHUTZ:**

Sollten Sie feststellen, dass Ihr Produkt ersetzt werden muss oder nicht mehr für Sie geeignet ist, denken Sie an die Umwelt:

- 1) Entsorgen Sie Ihr Produkt nicht im Hausmüll (darauf weist auch das abgebildete Recycling-Symbol hin).
- 2) Wenden Sie sich an Ihre zuständigen Behörden, die Ihnen die Recyclingzentren nennen werden, bei denen Ihr Produkt entsorgt werden muss.
- 3) Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Produkts trägt zum Schutz der Umwelt und zum Recycling der Produktbestandteile bei.

Um eine sichere Verwendung und einen angemessenen Hygienestandard zu gewährleisten, sollte der Benutzer diese Verfahren vor jedem Gebrauch durchführen.

Der Benutzer muss sich in Bezug auf die strukturelle Integrität des Produkts und seiner Komponenten vergewissern. Für die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

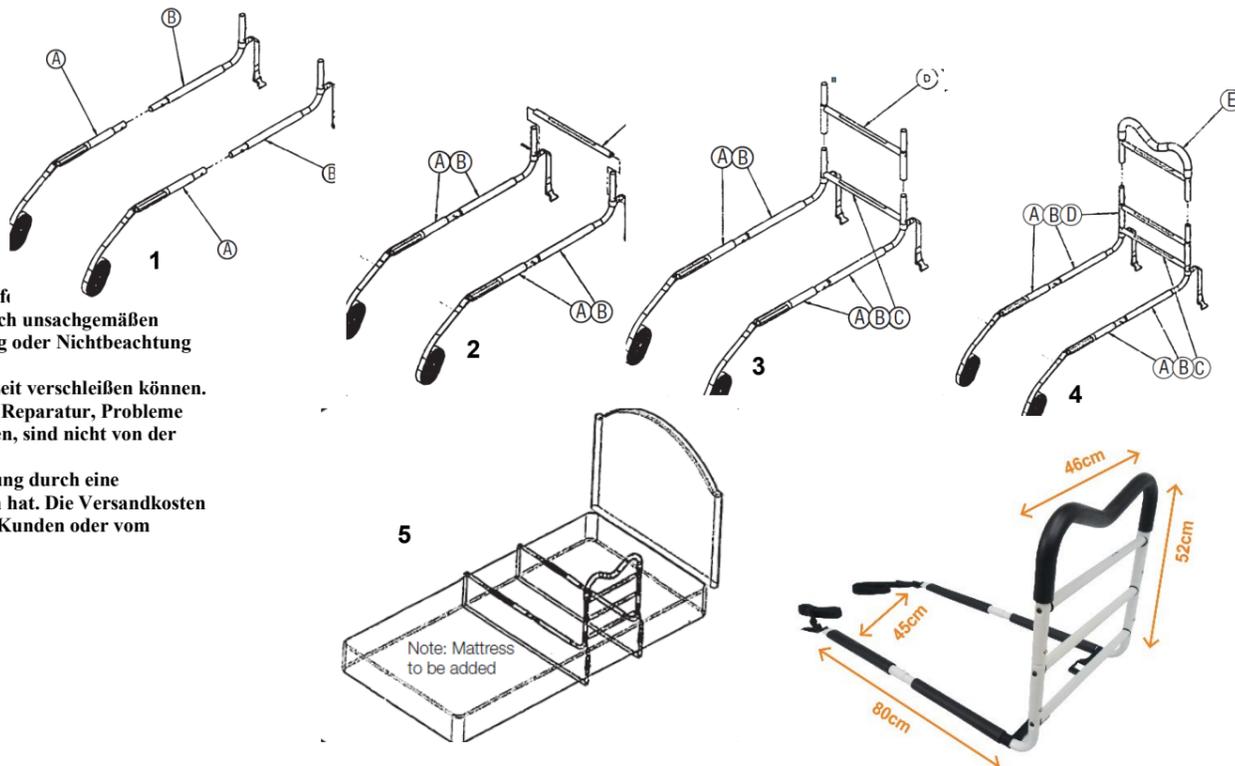
1. Verwenden Sie Handschuhe.
2. Entfernen Sie zunächst den sichtbaren Schmutz, bevor Sie zur sorgfältigen Desinfektion übergehen.
3. Verwenden Sie für die Reinigung Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel.
4. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen und sauberen Tuch ab.
5. Lassen Sie das Produkt NICHT nass stehen.
6. Verwenden Sie zur Reinigung des Rahmens keine chemischen Reinigungsmittel. Dies könnte zu Schäden an der Oberfläche des Produkts führen.
7. Wenn Sie das Produkt desinfizieren müssen, verwenden Sie ein handelsübliches, mildes Desinfektionsmittel.
8. Schützen Sie den Artikel vor Kratzern, Schnitten und Stichen.

MONTAGE:

HINWEIS: Die Montage-Abbildungen dienen nur als Beispiele, um die Montage zu erleichtern. Möglicherweise bestehen Unterschiede zum tatsächlichen Zustand.

- Teil A in Teil B einstecken und einrasten lassen. Auf der anderen Seite wiederholen.
- Teil C an Teil B festschrauben. Schrauben lose lassen.
- Teil D in Teil B einstecken und einrasten lassen.
- Abschließend Teil E in Teil D einstecken und einrasten lassen.
Stellen Sie sicher, dass alle Federknöpfe der Verschlüsse korrekt eingerastet sind.
- Für einen korrekten Sitz kann es nötig sein, Teile D und E anzuziehen oder zu lockern.
Sie können die Seitensicherung nun an Ihrem Bett befestigen.
- Schieben Sie das zusammengebaute Produkt zwischen die Matratze und den Lattenrost oder das Bettgestell.
- Führen Sie den langen Gurt über den Bettrahmen und anschließend unter diesem zurück zur Seitensicherung.
- Führen Sie den langen Gurt in der gewünschten Länge durch die Schnalle auf der gegenüberliegenden Seite. Sichern Sie den Gurt mit der Schnalle.
- Legen Sie die Matratze wieder auf das Bett, falls Sie diese entfernt haben.
- Legen Sie sich auf das Bett und positionieren Sie das Produkt dort, wo es am bequemsten für Sie ist.
- Ziehen Sie die beiden Gurte sicher am Bettgestell oder -rahmen fest und achten Sie darauf, dass sie gerade und parallel verlaufen.

Max. Belastung: 50 kg

**GEWÄHRLEISTUNG:**

Für das Produkt gilt eine Gewährleistungsfrist von einem (1) Jahr ab dem Kauf. Gewährleistung gilt für Herstellungsfehler und deckt KEINE Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, nicht ordnungsgemäße Wartung, Modifikation, Überbeanspruchung oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung des Produkts entstehen. Sie deckt auch NICHT die Teile ab, die während des Gebrauchs oder mit der Zeit verschleiben können. Schäden oder Defekte, die durch Naturkatastrophen, unbefugte Wartung oder Reparatur, Probleme mit der Stromversorgung (sofern zutreffend) und Spediteure verursacht wurden, sind nicht von der Gewährleistung gedeckt. Serviceleistungen oder Ersatzteile sind nur dann gedeckt, wenn eine Überprüfung durch eine autorisierte Kundendienststelle oder den Hersteller des Produkts stattgefunden hat. Die Versandkosten für Artikel, die zur Überprüfung übermittelt werden, sind vom Benutzer bzw. Kunden oder vom Händler zu tragen.

GEWÄHRLEISTUNGSFORMULAR:

ANGABEN ZUM KÄUFER:	
VOLLSTÄNDIGER NAME:	
KAUFDATUM:	
TELEFONNUMMER:	
LOT ODER SERIENNUMMER:	
ANGABEN ZUM HÄNDLER:	
VOLLSTÄNDIGER NAME:	
ADRESSE:	
TELEFONNUMMER:	
ZEICHEN UND UNTERSCHRIFT	

MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

MEHRSPRACHIGE
HANDBÜCHER



Beschreibung der Symbole auf dem Etikett, dem Originalkarton und/oder im Benutzerhandbuch.



BENUTZERHANDBUCH: SEITENSICHERUNG

REF : 0809250

MOBIAK S.A.
KAOIANA AKPOTHTPIOY, XANIA - KPHTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

