


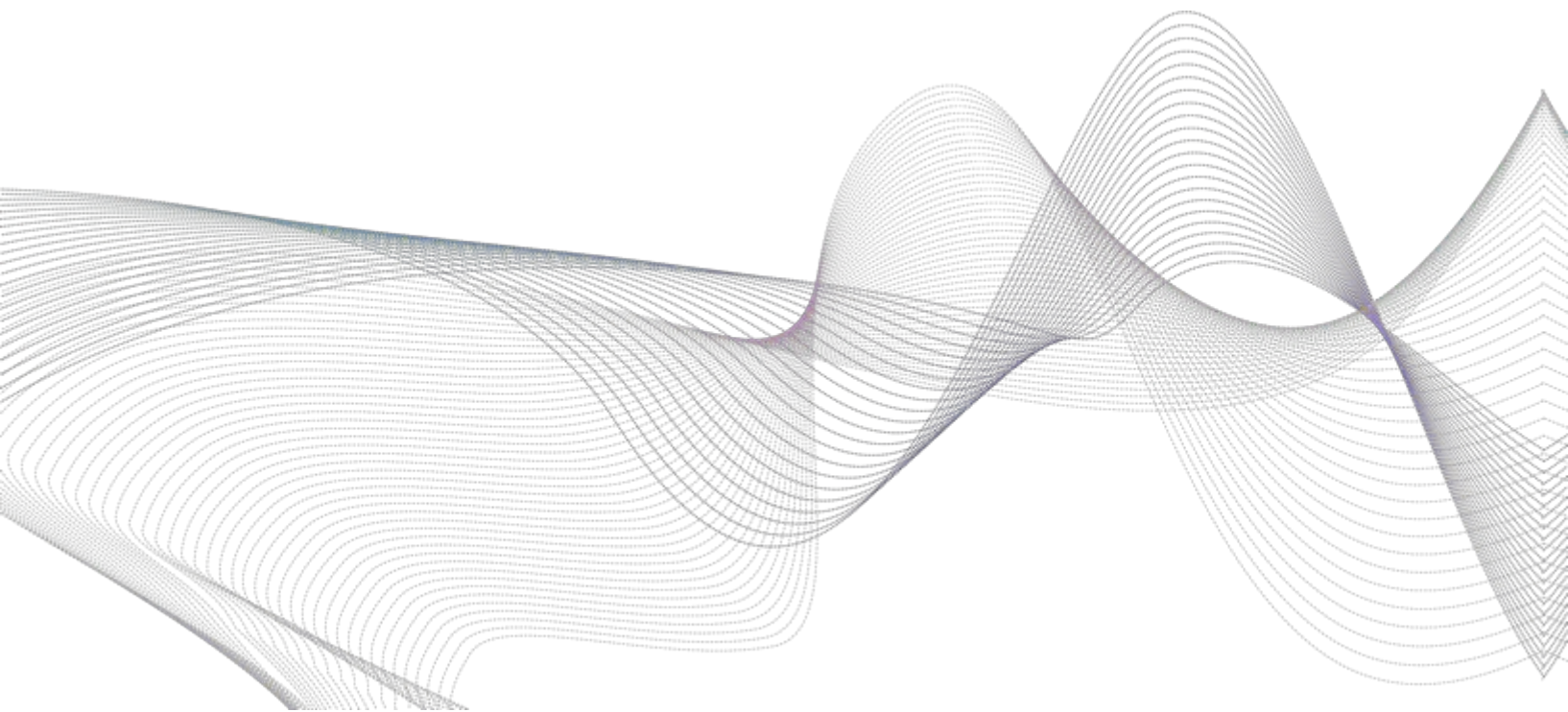


Atom Fold

Sammenklappelig mobilitetsscooter





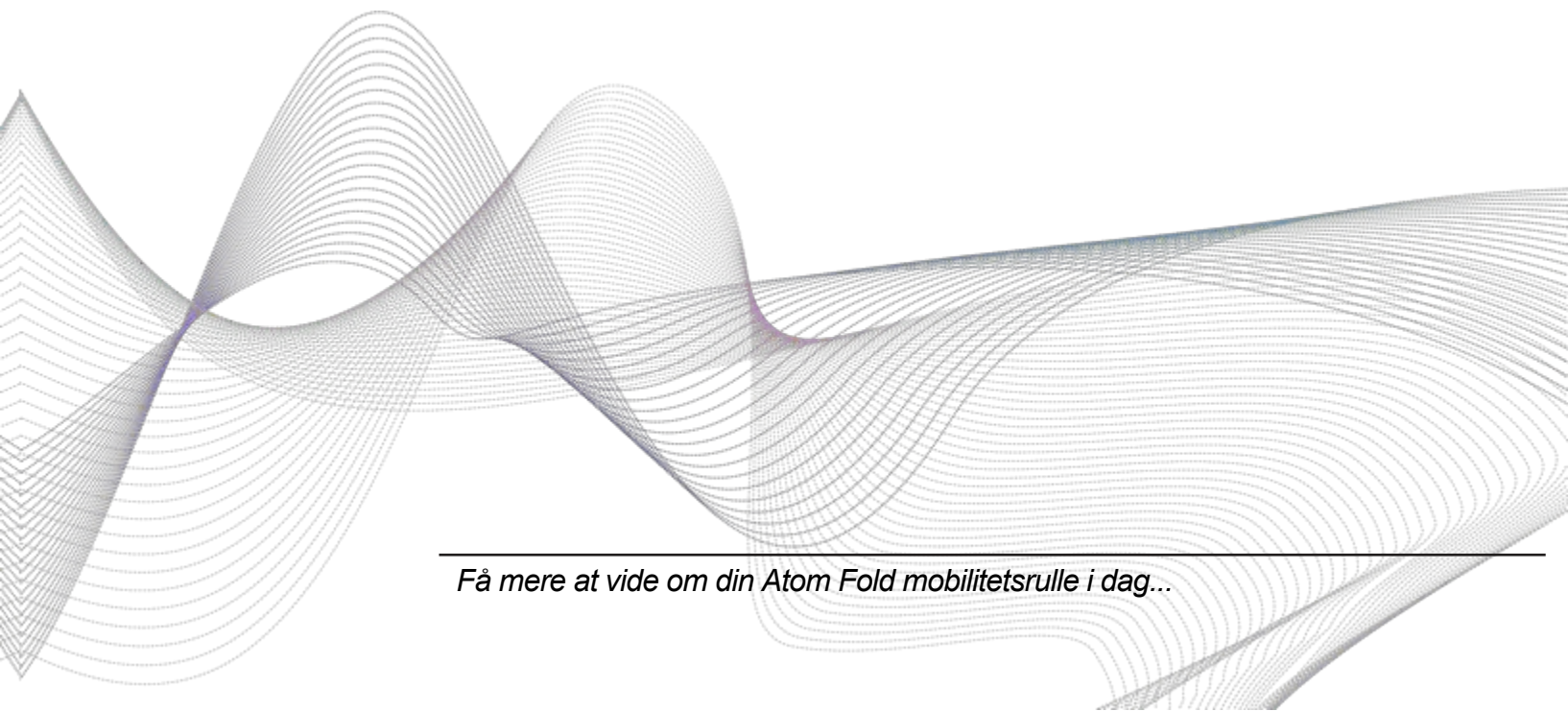

---

*Få mere at vide om din Atom Fold mobilitetsrulle i dag...*

# Indhold

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Indhold .....                      | 4  |
| 1 Velkommen .....                  | 5  |
| 2 Sikkerhedsoplysninger .....      | 6  |
| 3 Sikkerhedsadvarsler .....        | 7  |
| 3.1 Sikre stigninger .....         | 8  |
| 4 Utsigtet bevægelse .....         | 9  |
| 5 Indhold .....                    | 10 |
| 6 Egenskaber .....                 | 11 |
| 7 Driftsvejledning .....           | 12 |
| 7.1 Frihjulshåndtag .....          | 12 |
| 7.2 Udtagning af batterierne ..... | 13 |
| 7.3 Betjeningslementer .....       | 14 |
| 8 Foldning og udfoldning .....     | 16 |
| 9 Indstillinger af armlænet .....  | 20 |
| 9.1 Bredde .....                   | 20 |
| 9.2 Højde .....                    | 20 |
| 10 Fejlfinding og fejlkoder .....  | 21 |
| 11 .....                           |    |

|        |                                    |    |
|--------|------------------------------------|----|
|        | Vedligeholdelse .....              | 22 |
| 11.1   | Kontrol af komponenter .....       | 22 |
| 11.2   | Vedligeholdelse af batteriet ..... | 23 |
| 11.3   | Rengøring .....                    | 24 |
| 11.3.1 | Stel .....                         | 24 |
| 11.3.2 | Sædehynde .....                    | 24 |
| 12     | Garanti .....                      | 25 |
| 12.1   | Garanti .....                      | 25 |
| 12.2   | Garantiundtagelser .....           | 25 |
| 12.3   | Garantibestemmelser .....          | 26 |
| 13     | Specifikationer .....              | 27 |
| 14     | Serviceydelser .....               | 28 |
| 15     | Bemærkninger .....                 | 31 |

# 1 Velkommen

Tillykke med købet af din Scooterpac Atom Fold. Med regelmæssig vedligeholdelse og korrekt brug vil din Atom Fold give dig mange års og utallige kilometers værdifulde oplevelser. Denne vejledning indeholder de oplysninger, som du og din autoriserede Scooterpac-forhandler har brug for for at holde din Atom Fold i god stand.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte den Scooterpac-forhandler, der har leveret din Atom Fold, og han vil gerne hjælpe dig.

Denne Atom Fold blev oprindeligt leveret af:

Forhandlerens navn .....

Adresse 1 .....

Adresse 2 .....

By/sted .....

Postnummer .....

Telefonnummer .....

E-mail-adresse .....

Hjemmeside .....

## 2 Sikkerhedsoplysninger



En autoriseret mobilitetsudbyder eller en kvalificeret tekniker skal udføre den første opsætning af denne mobilitetsroller. De skal følge alle procedurer, der er beskrevet i denne vejledning.

Instruktionerne i denne vejledning er baseret på den antagelse, at mobilitetsrolleren er valgt korrekt til brugeren. Producenten antager desuden, at brugeren er blevet vejledt af den autoriserede mobilitetsudbyder og/eller den ordinerende læge for at sikre, at brugeren klart forstår, hvordan dette produkt skal betjenes sikkert.

### 3 Sikkerhedsadvarsler

|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Brug ikke din mobilitetsroller, før du har læst og forstået denne vejledning fuldt ud. |
|  | Tag ikke din mobilitetsrulle i brug, før montering og inspektion er afsluttet.         |
|  | Atom Fold må kun betjenes af én person.                                                |
|  | Læg armene på armlænene og fødderne på fodstøtterne under kørslen.                     |
|  | Brug ikke mobilitetsrolleren i et kørende køretøj.                                     |
|  | Kør altid fremad på skråninger, kantsten og andre forhindringer.                       |
|  | Pludselige vendinger eller pludselige hastighedsændringer frarådes.                    |
|  | Undgå overflader, hvor der er risiko for at glide på grund af is eller fugt.           |
|  | Undgå at køre på løst underlag såsom grus.                                             |
|  | Kør ikke op eller ned ad trapper med Atom Fold. Vend ikke Atom Fold på en skråning.    |
|  | Overskrid aldrig den maksimale belastning på 125 kg.                                   |
|  | Kun passageren eller en ansvarlig person må betjene mobilitetsscooteren.               |
|  | Kør aldrig på mobilitetsrolleren under indflydelse af alkohol.                         |

### 3.1 Sikker -stigninger

Atom Fold kan sikkert klare stigninger på op til  $10^\circ$ . På denne  $10^\circ$  stigning kan Atom Fold stoppe, bremse og vende. Det er muligt at klare stejlere stigninger, men vi fraråder det på det kraftigste. For at mindske risikoen for at vælte på stigninger skal du reducere belastningen på bagsiden af rolleren ved at skubbe sædet så langt frem som muligt og læne dig fremad.



*Figur 1 - Anbefalede stigninger*

## **4 Utsigtet bevægelse af**

Atom Fold skal altid være i stilstand før brug. Når Atom Fold tændes, forbliver den i stilstand, indtil fremad- og bagudkoblingshåndtaget trykkes eller trækkes.

Forsøg ikke at betjene mobilitetsrolleren, mens du står.

## 5 Indhold



Atom Fold



Lithium-batteri



Oplad



Nøgle



Armlæn



Indvendig sekskantnøgle

## 6 Egenskaber



|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 1  | Instrumentbræt                        |
| 2  | Ratarm                                |
| 3  | Integreret opladningsport             |
| 4  | Frem/tilbage-håndtag                  |
| 5  | Håndtag til sammenklapning            |
| 6  | Foldemekanisme til styret             |
| 7  | Forhjul                               |
| 8  | Ryglæn                                |
| 9  | Armlæn                                |
| 10 | Pude                                  |
| 11 | Justeringsmøtrik til armlænets bredde |
| 12 | Justeringsmøtrik til armlænets højde  |
| 13 | Akku                                  |
| 14 | Frihjulshåndtag                       |
| 15 | Vipbeskyttelseshjul                   |
| 16 | Baghjul                               |
| 17 | Sammenklappelig kurv                  |

## 7 Betjeningsvejledning

### 7.1 Frihjulshåndtag

Frihjulshåndtaget er placeret på venstre bagside af Atom Fold.

Når håndtaget er i den nederste position, er mobilitetsrolleren i friløbsmodus og kan bevæges frit.

Mobilitetsrolleren kan tændes, men bevægelseskontrollen fungerer ikke.

Når du sætter håndtaget i opadgående position, er mobilitetsrolleren i køreindstilling, og bremsen er aktiveret. Når rolleren er tændt, kan den styres med håndtaget til fremad- og bagudkørsel. Når håndtaget slippes, bremser rolleren automatisk.



Træk opad for køreindstilling




Tryk nedad for friløbsfunktion

## 7.2 Fjernelse af -batterier

Fjern batteriet for at bruge den eksterne opladningsfunktion. Batteriet kan oplades via opladningsstikkene på batteriet.

Når du løfter og transporterer mobilitetsscooteren, reduceres den samlede vægt ved at fjerne batterierne, så den er lettere at transportere.

Bemærk venligst - Atom Fold leveres som standard med et lithium-batteri og en tom opbevaringsboks. For at øge den maksimale rækkevidde på en opladning kan der købes et ekstra batteri, som kan opbevares om bord.

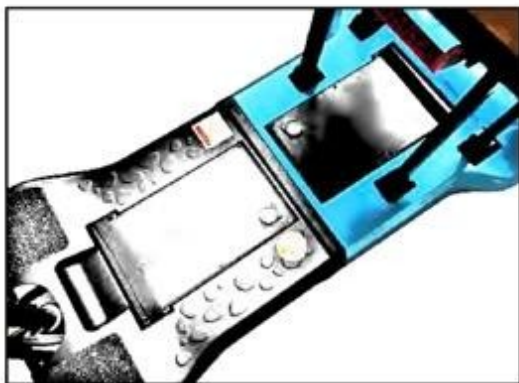

### 7.3 Betjenings- elementer



LED-forlygte



Frem

Bagud



Opladningsport på scooteren

## 8 Foldning og udfoldning ( )



Sammenfoldet position



Fare for at falde, hvis  
rulleskøjten er foldet  
sammen og placeret  
lodret.

## Trin 1



For at folde sædet skal du trække håndtaget til foldning opad.

## Trin 2



Tryk sædet ned mod fodstøtten.

### Trin 3



Træk i foldemekanismen på ratstammen for at løsne styret.  
Fold derefter styret nedad i retning af ryglænets spænde.

## 9 Indstillinger af -armlæn

### 9.1 Bredde



### 9.2 Højde



## 10 Fejlfinding og fejlkoder for

| Bip | Opløsning                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Batteriet skal oplades, eller der er en dårlig forbindelse. Kontroller batteriets tilslutninger. Hvis tilslutningerne og kontakterne er rene, skal du oplade batteriet. |
| 2   | Der er en fejl i forbindelsen til motoren. Kontroller alle forbindelser mellem motor og styreenhed.                                                                     |
| 3   | Motoren har en kortslutning. Kontakt en autoriseret Scooterpac-forhandler.                                                                                              |
| 4   | Ikke relevant / fejlkode ikke anvendt.                                                                                                                                  |
| 5   | Ikke relevant / fejlkode ikke anvendt.                                                                                                                                  |
| 6   | Opladerkablet er sat i opladningsstikket. Fjern det.                                                                                                                    |
| 7   | Kontrolhåndtaget er defekt. Kontroller, om håndtaget er i nulposition. Rør ikke ved håndtaget, før du tænder for strømmen.                                              |
| 8   | Fejl på styremodulet. Kontroller alle tilslutninger.                                                                                                                    |
| 9   | Fritløbsbremsen er aktiveret. Flyt fritløbsgrebet opad.                                                                                                                 |
| 10  | Batterispændingen er for høj. Kontakt en autoriseret Scooterpac-forhandler.                                                                                             |



Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet med antallet af bip, du hører, skal du kontakte din autoriserede Scooterpac-forhandler for at få hjælp.

# 11 Vedligeholdelse

## 11.1 Kontrol af komponenter

Før du udfører vedligeholdelsesarbejde, skal du slukke for scooteren og tage batterierne ud.

| Komponent                 | Dagligt | Ugentligt | Månedligt | Hver 3. måned | Hver 12. måned |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Batteri                   | ✓       |           |           |               |                |
| Dæk                       | ✓       |           |           |               |                |
| Strømforsyning            |         | ✓         |           |               |                |
| Chassis                   |         |           |           | ✓             |                |
| Rengøring af sædehynder   |         |           |           | ✓             |                |
| Elektromagnetiske bremses |         |           |           |               | ✓              |

## 11.2 Vedligeholdelse af -batteriet



Når mobilitetsscooteren ikke er i brug, skal scooteren og batteriet opbevares i et tørt miljø. Hårde miljøpåvirkninger kan beskadige batteriet.



Hvis du planlægger at opbevare din mobilitetsscooter i mere end en uge og ikke bruge den, skal du fjerne lithiumbatteriet fra Atom Fold. På den måde kan du forlænge batteriets levetid.

## **11.3 Rengøring**

For at bevare din scooters levetid skal du holde den ren og tør. Tør din scooter af efter brug.

### **11.3.1 Stel**

For at vedligeholde rammen skal du tørre Atom Fold af med bløde mikrofiberklude.

**TOPTIP - Brug ikke vand og vask ikke rammen.**

### **11.3.2 Sædehynder**

For at pleje sædehynderne skal du tage dem ud af mobilitetsrolleren. Rengør sædehynderne med varmt vand og fortyndet sæbevand.

## **12 Garanti**

### **12.1 Garanti**

Den lovmæssige garantiperiode gælder for stel, bremses, motor og elektriske komponenter.

### **12.2 Garantiundtagelser**

1. Sædehynder, herunder skader, der opstår ved rengøring af tekstiler.
2. Reparationer og/eller ændringer af nogen del af mobilitetsrolleren uden udtrykkelig og forudgående tilladelse fra Scooterpac.
3. Omstændigheder, der ligger uden for Scooterpacs kontrol
4. Undtaget er også komponenter med skader, der skyldes:
  - a. Forurening (regn osv.)
  - b. Misbrug, forkert brug, uheld eller uagtsomhed.
  - c. Erhvervsmæssig brug
  - d. Forkert betjening, vedligeholdelse eller opbevaring.

## 12.3 Garantibestemmelser

Garantien dækker kun defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl og opstår ved normal brug. Garantien gælder for den oprindelige køber og kan ikke overdrages.

Garantien dækker ikke følgeomkostninger, der opstår som følge af fejlfinding, fragt- og rejseomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter osv. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller personskaader, der opstår som følge af misbrug eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugsanvisning.

### Om dit produkts levetid

Produktets levetid er angivet til 5 år, forudsat at det anvendes efter hensigten, og alle service- og vedligeholdelsesforskrifter overholdes nøje.

Levetiden kan afvige fra ovenstående periode. Hvis produktet plejes og vedligeholdes omhyggeligt, og sliddele udskiftes, kan levetiden forlænges betydeligt (forudsat at den aktuelt anvendte teknologi ikke begrænses af innovationer og fremskridt).

Ekstrem brug og forkert brug kan dog også reducere levetiden betydeligt! Den angivne levetid udgør ikke en yderligere garanti og har ingen indflydelse på de lovmæssige garantibestemmelser.

Manglende overholdelse af service- og vedligeholdelsesforskrifterne kan medføre, at dine garantikrav bortfalder.

## 13 Specifikationer

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Batterier                                            | 24V 10Ah lithium     |
| Rækkevidde <sup>1</sup>                              | 15 km                |
| Vægt <sup>2</sup>                                    | 15 kg                |
| Nyttelast                                            | 120 kg               |
| Maks. hastighed                                      | 6 km/h               |
| Motor                                                | Baghjulstræk / 120 W |
| Bremser                                              | Elektromagnetiske    |
| Dæk                                                  | 7" PU fast           |
| Maksimal hældning <sup>1</sup>                       | 12 grader            |
| Vendekreds                                           | 1400 mm              |
| Fodstøtte                                            | Sammenklappelig      |
| <b>Samlet størrelse<sup>3</sup></b>                  |                      |
| Længde                                               | 1027 mm              |
| Bredde                                               | 530 mm               |
| Højde                                                | 945 mm               |
| <b>Størrelse i sammenfoldet tilstand<sup>3</sup></b> |                      |

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 1027 mm |
| Bredde | 530 mm  |
| Højde  | 440 mm  |

<sup>1</sup> Varierer afhængigt af batteriopladning/tilstand/tilvalg, terræn, dæktilstand og bilens belastning.

<sup>2</sup> Uden batterier, puder, armlæn og kurv.

<sup>3</sup> På grund af produktionstolerancer og løbende produktforbedringer kan denne specifikation afvige med +/- 3 %.

## 14 Serviceydelser

For at sikre sikker drift skal Atom Fold vedligeholdes hver 12. måned. Vi anbefaler, at du noterer vedligeholdelsesdatoer og -steder på nedenstående ark. Lad altid din Atom Fold reparere af en autoriseret Scooterpac-forhandler, der bruger originale Scooterpac-reservedele.

| År   | Service            |  | Næste service forfalder |
|------|--------------------|--|-------------------------|
| År 1 | Forhandlerens navn |  |                         |
|      | Teknikerens navn   |  |                         |
|      | Dato for service   |  |                         |
|      | Bemærkninger       |  |                         |
|      | Underskrevet       |  |                         |

| År     | Service            |  | Næste service forfalder |
|--------|--------------------|--|-------------------------|
| To år  | Forhandlerens navn |  |                         |
|        | Teknikerens navn   |  |                         |
|        | Dato for service   |  |                         |
|        | Bemærkninger       |  |                         |
|        | Underskrevet       |  |                         |
| År     | Service            |  | Næste service forfalder |
| Tre år | Forhandlerens navn |  |                         |
|        | Teknikerens navn   |  |                         |
|        | Dato for service   |  |                         |
|        | Bemærkninger       |  |                         |
|        | Underskrevet       |  |                         |

| år      | Service            |  | Næste service<br>forfalder |
|---------|--------------------|--|----------------------------|
| År fire | Forhandlerens navn |  |                            |
|         | Teknikerens navn   |  |                            |
|         | Dato for service   |  |                            |
|         | Bemærkninger       |  |                            |
|         | Underskrevet       |  |                            |
| År      | Service            |  | Næste service<br>forfalder |
| År Fem  | Forhandlerens navn |  |                            |
|         | Teknikerens navn   |  |                            |
|         | Dato for service   |  |                            |
|         | Bemærkninger       |  |                            |
|         | Underskrevet       |  |                            |

**15**

**Bemærkninger**

---

---

---

---

---

---

---

---

# EC-overensstemmelseserklæring

Naa\$acce:

who<e si|gle A.r'thonzed EU-Representat ve.

ficooterpac  
Elevation House,  
23 Commercial Road, Lof/estoft,  
Suffolk,  
Storbritannien  
NR32

f.1edNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10  
48 163 M(inster  
Germanv

Tel. 44 330 124 1733

SRN. DE-AR-000000002

SRN.

Erklæring

'r/e, producenten, erklærer hermed, at produkte

Mobilitet 5 cooler: Aton Fold  
Basic UDI-DI.

50b5014b41Aton1FolcidE

Signature:

Managing Director)

Date: 17/01/25

Overholder bestemmelserne i forordning (EU) 2017/T43. Overholder  
RoHS-direktivet 2011/5/EU.

Det medicinske udstyr er klassificeret som klasse I i henhold til bilag III i forordning (EU) 2017/745. Det er mærket med

follo/zing the conformir,' assess ment procedure set out in AlJnex II and III R.-gulat on i EU.' 201\*\*74?.

Denne overensstemmelseserklæring gælder for alle medicinske udstyr som angivet i produktlisten, der er vedlagt  
denne erklæring.

Denne erklæring er udstedt i forbindelse med det tekniske konstruktionsdokument SP.

Ovennævnte erklæring om overensstemmelse er udelukkende underlagt ansvaret for

Scooter |ac  
Ele/arioIJ House 23 CCommercial Road, Low esroft Suffolk, United K ingdoni NR32