

# GEBRAUCHSANWEISUNG


## Unterarmgehstütze mit hochklappbarer Unterarmstütze

Produktcode: FlipTim



### 1. Eigenschaften

Die Ellenbogenkrücke besteht aus einem bequemen, langlebigen Handgriff, einer speziellen verstellbaren, hochklappbaren Unterarmstütze und einem Aluminiumschaft mit hochwertiger Gummispitze. Dank der Längenverstellung und Klappfunktion ist sie sehr praktisch für den täglichen Gebrauch. Die Krücke hat eine ergonomische Form der Manschette und eine Winkelverstellung, die eine optimale Druckverteilung auf den Handgriff gewährleistet.

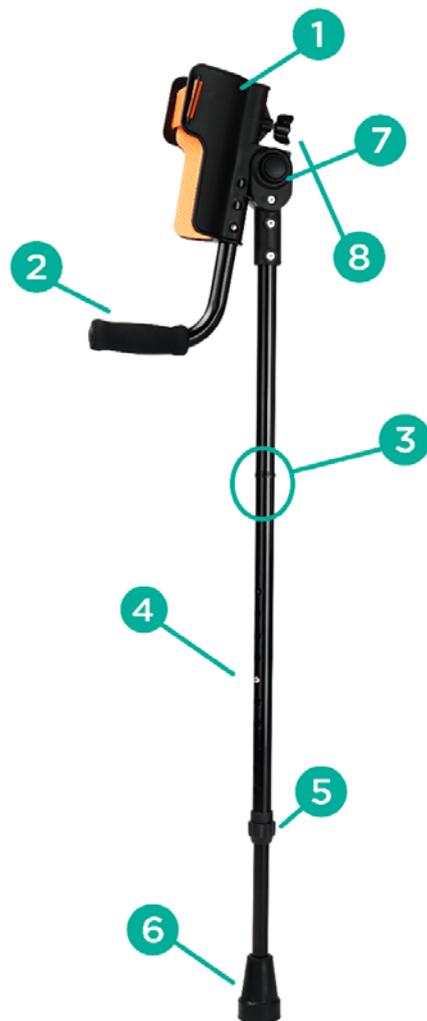

1. Unterarm Unterstützung
2. Handgriff
3. Faltpunkt
4. Höhe Einstellung
5. Verstell Sperre
6. Gummi Tipp
7. Unterarm Unterstützung Winkel Einstellung
8. Handgriff Länge Einstellung

#### AFTER FOLDING



### 2. Anwendung

Die Unterarmgehstütze ist ein Hilfsmittel, das zur Vergrößerung der Stützfläche bei Patienten mit eingeschränkter Mobilität verwendet wird. Sie wird auch Patienten empfohlen, die beim Gehen Hilfe und Unterstützung benötigen. Sie kann als Hilfe zur Erhaltung des Gleichgewichts nach Verletzungen der unteren Gliedmaßen oder des Rumpfes verwendet werden.

**Kontraindikationen:** Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen, fortgeschrittene rheumatische Veränderungen, Verletzungen und Funktionsstörungen der oberen Extremitäten, die das Stützen auf der Krücke behindern können.

### **3. Montage und Einstellung**

- Um den Transport zu erleichtern, verfügt die Krücke über eine Klappfunktion. Vor der Längenverstellung sollte die Krücke durch Verbinden der beiden Schaftteile auseinandergeklappt werden.
- Um die Länge der Krücke anzupassen, schrauben Sie die Verstellsperrung ab.
- Um die Krücke einzustellen, drücken Sie den Feststellstift und wählen Sie die entsprechende Position des Innenrohrs. Fixieren Sie die Position mit dem Feststellstift. Die Krücke ist in 2,5 cm- Schritten verstellbar .
- Sobald die Längeneinstellung abgeschlossen ist, schrauben Sie die Sperre für die Krückeneinstellung fest.
- Um die richtige Länge der Krücke einzustellen, stehen Sie aufrecht und beugen Sie die obere Extremität im Ellbogengelenk in einem Winkel von 20°.
- Die Gehstütze sollte individuell auf den Benutzer eingestellt werden, sodass sich der Handgriff auf Höhe des Hüftgelenks und die Manschette auf Höhe des oberen Unterarms befindet.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Krücke stabil ist und der Verriegelungsstift vollständig durch das Einstellloch der Krücke ragt.

**HINWEIS!** Bei Zweifeln bezüglich der Bewegungstechnik mit Krücken wenden Sie sich an eine Person mit den entsprechenden Kenntnissen und Qualifikationen.

#### **EINSTELLUNG DER HANDGRIFFLÄNGE**

- Die Krücke verfügt über eine Handgriffhöhenverstellung. Um die Höhe einzustellen, schrauben Sie den Knopf auf der Rückseite der Unterarmstütze ab und drücken Sie den Verriegelungsstift hinein. Wählen Sie dann die entsprechende Höhe aus. Verriegeln Sie den Stift und ziehen Sie die Schraube fest.

#### **WINKLEINSTELLUNG DER UNTERSTÜTZUNG**

- Die Krücke verfügt über einen verstellbaren Winkel der Unterarmauflage am Unterarm. Der maximale Verstellwinkel beträgt 90°.
- Um den Stützwinkel einzustellen, drücken Sie die Taste unter der Unterarmstütze.



#### 4. Technische Daten

Gesamt Breite	21 cm
Höhe Einstellung	97-119 cm
Handgriff Länge Anpassung	27-32 cm
Unterarm Unterstützung Breite	10,5 cm
Größe nach falten	70 x 23,5 cm
Maximale Kapazität	136 kg
Gewicht	1,60 kg
Bein	Aluminium, schwarz

#### 5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

#### 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Krücke nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln und wischen Sie sie nach jedem Gebrauch trocken.
- **Verwenden Sie keine** scharfen Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust der Garantierechte führen).
- Es wird empfohlen, die Gummispitze regelmäßig zu überprüfen. Ersetzen Sie abgenutzte Spitzen umgehend.

#### 7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

#### 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer

Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.timago.com](http://www.timago.com).  
Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



### Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



01/2025 (II)