

1. Eigenschaften

Die elastische Handgelenkstütze besteht aus nahtlosem orthopädischem Kompressionsgewebe. Die Daumenstütze verhindert, dass das Band nach unten rutscht. Das moderne und geräumige Gewebe ist luftdurchlässig und leitet übermäßige Wärme und Feuchtigkeit ab, wodurch die Entwicklung einer Bakterienflora eingeschränkt wird. Die Handgelenkstütze kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden.

2. Anwendung

Eine Handgelenkbandage dient der Stabilisierung des Gelenks und lindert Schmerzen, die bei körperlichen Belastungen, beispielsweise im Sport, auftreten.

Anwendungsgebiete:

- Schmerzsyndrom der Gelenke durch Entzündungen, Überlastungen und Mikroverletzungen,
- Fortgeschrittene degenerative Veränderungen des Radiokarpalgelenks und des Handgelenks,
- Kleinere Verdrehungen und Zerrungen,
- Chronische Instabilität.

Kontraindikationen:

Nicht verwenden bei:

- Hautabschürfungen,
- Ekzem,
- Wunden und andere Hautverletzungen,
- Nach dem Auftragen von wärmendem Gel oder Salbe,

- Individuelle Kontraindikationen, die vom Arzt im Gespräch und bei der körperlichen Untersuchung festgestellt wurden.

3. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Wartung des Produkts, Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Missbrauch.

4. Montageanleitung

Ziehen Sie die elastische Bandage über das Handgelenk und legen Sie den Daumen in die Daumenöffnung. Stabilisieren Sie das Handgelenk mithilfe des umlaufenden, mit Klettverschluss befestigten Gurtes.

Hinweis! Nur die richtige Größe garantiert eine Schmerzlinderung.

Notiz! Eine langfristige Anwendung kann zu einer Verringerung des Muskeltonus und zu Funktionsstörungen der Gliedmaßen führen.

5. Technische Daten

GRÖSSE	HANDGELENKUMFANG (CM)
S	13-15
M	15-18
M	18-20
XL	20-22

6. Wartung

- Handwäsche in warmem Wasser. Nicht im Trockner trocknen, chlören, bügeln, bleichen, chemisch reinigen oder im Wäschetrockner trocknen.

- Bei Raumtemperatur und fernab einer intensiven Wärmequelle trocknen.

Hinweis! Wartungsinformationen finden Sie auf dem Materialetikett.

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



01/2025 (II)