

GEBRUIKSAANWIJZING

Orthopedisch kussen

Productcode: CPAP DREAM

Zijslaper- en CPAP-kussen

Productcode: SLEEP BUDDY

Orthopedisch kussen

Productcode: ORTO DREAM

Orthopedisch slaapkussen

Productcode: MAGIC DREAM

Tweedelig orthopedisch kussen voor de onderste ledematen

Productcode: SPACER

1. Kenmerken

CPAP DREAM

Het geprofileerde ontwerp en het traagschuim zorgen voor comfort bij gebruikers van CPAP-apparaten. Het speciale ontwerp helpt voorkomen dat het masker tijdens de slaap verschuift. Het kussen wordt geleverd met een kussensloop met ritssluiting, van hoogwaardige zachte en goed ademende stof.

SLEEP BUDDY

Het geprofileerde ontwerp en het traagschuim zorgen voor comfort bij gebruikers van CPAP-apparaten en bij zijslapers. Het speciale ontwerp helpt voorkomen dat het masker tijdens de slaap verschuift. Het kussen wordt geleverd met een kussensloop met ritssluiting, van hoogwaardige zachte en goed ademende stof.

ORTO DREAM, MAGIC DREAM

Het kussen is gemaakt van traagschuim om de cervicale wervelkolom en het hoofd tijdens de slaap goed te ondersteunen en correct te positioneren. Het kussen wordt geleverd met een zachte kussensloop met ritssluiting, van hoogwaardige zachte en goed ademende stof.

SPACER

Het tweedelige kussen is gemaakt van traagschuim, waardoor het zich gemakkelijk aan het lichaam aanpast en het comfort van de gebruiker verbetert. Het kan gesloten en uitgevouwen worden gebruikt. Het kussen wordt geleverd met een zachte kussensloop met ritssluiting, van hoogwaardige zachte en goed ademende stof.

2. Toepassing

CPAP DREAM, SLEEP BUDDY

Het kussen is ontworpen voor personen met slaapapneu die een CPAP-apparaat gebruiken (en voor zijslapers – SLEEP BUDDY). Het maakt een comfortabele

positionering van het hoofd met het masker mogelijk tijdens slaapapneutherapie. Voor een comfortabele pasvorm van het masker heeft het kussen speciale uitsparingen. Het traagschuim ondersteunt het hoofd en past zich aan de gebruiker aan. Het gebruik van het kussen heeft een positief effect op klachten door een onjuiste positie van nek en hoofd tijdens de slaap (rugpijn, spierspanning, tintelingen en gevoelloosheid in de ledematen enz.). Profylactisch aanbevolen.

ORTO DREAM

Het kussen bevordert de fysiologische uitlijning van de cervicale wervelkolom. De juiste aanpassing aan de cervicale lordose vermindert spierspanning in de nek. Ontworpen voor personen die tijdens de slaap stabiele ondersteuning van hoofd en cervicale wervelkolom nodig hebben, met minder druk op het lichaam. Het gebruik van het kussen helpt klachten door een onjuiste positie van nek en hoofd tijdens de slaap te voorkomen (rugpijn, spierspanning, tintelingen en gevoelloosheid in de ledematen enz.). Profylactisch aanbevolen.

MAGIC DREAM

Het kussen heeft een positief effect op de fysiologische uitlijning van de cervicale wervelkolom. Ontworpen voor personen die tijdens de slaap stabiele ondersteuning van hoofd en cervicale wervelkolom nodig hebben, met minder druk op het lichaam. Het gebruik van het kussen helpt klachten door een onjuiste positie van nek en hoofd tijdens de slaap te voorkomen (rugpijn, spierspanning, tintelingen en gevoelloosheid in de ledematen enz.). Aanbevolen als preventie voor gezond slapen.

SPACER

Het kussen wordt gebruikt bij pijnklachten van het kniegewricht en na alloplastiek van het heupgewricht. In gesloten vorm positioneert het kussen bekken en heupen correct, waardoor spanning, pijn en vermoeidheid in de onderste ledematen afnemen. Uitgevouwen ondersteunt het het onderste deel van de benen om de gebruiker correct te positioneren. Het kussen zorgt voor een fysiologische uitlijning van de gewrichten, verbetert de circulatie in de onderste ledematen en wordt ook gebruikt ter preventie van doorligwonden.

3. Contra-indicaties

Gebruikers met ernstige medische aandoeningen of veranderingen van de cervicale wervelkolom moeten vóór het eerste gebruik van het kussen een arts of fysiotherapeut raadplegen.

4. Opmerkingen

Timago International Group is niet verantwoordelijk voor onjuist onderhoud van het product, het niet naleven van veiligheidsregels of gebruik van het product in strijd met het beoogde doel.

5. Technische gegevens

Model	Afmetingen	Dichtheid	Samenstelling onderdelen	Kussensloop	Kleur
CPAP DREAM	50 x 30 x 10 cm	45 kg/m ³	Kussensloop: katoen 90% polyester 10% Vulling: thermo-elastisch schuim	dampdoorlatend, ritssluiting	wit
SLEEP BUDDY	62 x 40 x 13,5 cm	40 kg/m ³	Kussensloop: polyester 95% elastaan 5% Vulling: thermo-elastisch schuim	dampdoorlatend, ritssluiting	wit + grijs
ORTO DREAM	60 x 40 x 12 cm	45 kg/m ³	Kussensloop: polyester 100% Vulling: thermo-elastisch schuim	dampdoorlatend, ritssluiting	wit
MAGIC DREAM	70 x 42 x 10 cm	45 kg/m ³	Kussensloop: polyester 95%, elastaan 5% Vulling: thermo-elastisch schuim	dampdoorlatend, ritssluiting	wit
SPACER	25 x 20 x 15 cm	45 kg/m ³	Kussensloop: polyester 100% Vulling: thermo-elastisch schuim	dampdoorlatend, ritssluiting	grijs

6. Onderhoud

- Was de kussensloop met de hand in lauw water; niet centrifugeren, chloreren, strijken, bleken, in de droogtrommel drogen of chemisch reinigen.
- Droog bij kamertemperatuur, uit de buurt van sterke warmtebronnen.

Let op! Onderhoudsinformatie staat op het textiellabel.










7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder een garantie waarvan de voorwaarden zijn beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantiedoeleinden het aankoopbewijs (bon of factuur) moet worden bewaard.

9. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		Productiedatum
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	De fabrikant heeft gecontroleerd of aan de essentiële eisen voor medische hulpmiddelen is voldaan.		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar bij onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Dank u voor uw keuze voor Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)