



DRIFT-TIM

KØRESTOL I ALUMINIUM

BRUGSANVISNING

KØRESTOLENS DELE



1. Håndgreb
2. Bremse til ledsager
3. Foldemekanisme til ryglæn
4. Armlæn
5. Parkeringsbremse / håndbremse
6. Drivring
7. Quick release-mekanisme
8. Fodplade
9. Justering af tyngdepunkt

10. Lægbælte
11. Knap til justering af armlæn
12. Ryglæn
13. Sæde med sikkerhedssele
14. Fodstøttehåndtag
15. Massivt baghjul 24"
16. Massivt forhjul 8"
17. Antitip-hjul

1. Egenskaber

Kørestolen er fremstillet af en let aluminiumsramme. Den er udstyret med højdejusterbare, profilerede armlæn og valgfrit aftageligt polster til ryglæn og sæde, fremstillet af åndbart mesh-materiale. Takket være quick release-funktionen på baghjulene og justeringen af tyngdepunktet på for- og baghjulene kan kørestolen tilpasses brugerens individuelle behov. Den er også udstyret med bremses til ledsager og et foldbart ryglæn. Fås i en version med massive 24" baghjul og massive 8" forhjul. **Sættet indeholder:** kørestolsramme med hjul, sæde og ryglæn, sikkerhedssele, monteringsnøgler.

Valgfrit tilbehør: antitip-hjul, fodstøtter med sikkerhedsbånd, mesh-polster.

2. Anvendelse

Kørestolen er beregnet til personer, der har problemer med at bevæge sig uden hjælp, samt til patienter med funktionsnedsættelser og nedsat mobilitet. Denne selvkørende kørestol kan også skubbes af en ledsager. Takket være muligheden for at tilpasse indstillingerne til brugerens individuelle behov giver kørestolen bedre kontrol, større stabilitet og en mere dynamisk, aktiv kørsel i hverdagen. Kørestolen er egnet til både indendørs og udendørs brug.

3. Montering

Trin 1. Udfoldning af kørestolen

Placer kørestolen på gulvet. Fold kørestolen ud ved hjælp af armlænen. Tryk derefter på sædets forreste og bagerste kant, så alle elementer passer sammen.

Trin 2. Ryglæn og sæde

Løft ryglænet opad, og lås det med ryglænslåsene, som er placeret under håndgrebene. Fastgør polstret på kørestolen, og fastgør den nederste del af polstret med velcro under sædet.

Trin 3. Fodstøtter

Fastgør fodstøttens plastgreb på ydersiden af kørestolsrammen. Sæt derefter fodstøttens monteringselement ind i åbningen foran på rammen, og drej fodstøtten indad, indtil den låses.

Trin 4. Armlæn

Armlænen kan justeres i højden ved hjælp af en stift på ydersiden af armlænet.

Trin 5. Højdejustering af fodstøtter

Juster højre og venstre fodstøtte ved at spænde skruen, som er placeret på fodstøtterøret, med den medfølgende nøgle. Der skal være passende afstand mellem fodpladerne og gulvet, da fodplader, der er indstillet for lavt, kan gøre det vanskeligt at overvinde forhindringer såsom kantsten. Juster fodpladerne, så vinklen mellem overkrop og lår er 90° — optimal siddestilling.

Trin 6. Montering af beskyttelsesrem

Sæt beskyttelsesremmen på den øverste del af fodstøtten for at forhindre brugerens ben i at glide ned fra fodpladerne.

FOLDNING

Kørestolen kan foldes sammen igen for at gøre transport og opbevaring lettere.

- Sving fodpladerne væk, og indstil dem i lodret position.
- Afmonter polstret fra sædet.
- Brug håndtaget til at løfte sædet opad, indtil kørestolens ramme er foldet sammen.
- For at folde ryglænet skal du samtidig trykke på låseelementerne, som er placeret bag på ryglænet, og trække ryglænet nedad.

PARKERINGSBREMSE

For at låse hjulene skal du skubbe parkeringsbremsens håndtag fremad, indtil hjulet er helt blokeret — separat for venstre og højre hjul. Bemærk, at hjullåsen kun er beregnet til at låse hjulene, når kørestolen holder helt stille.

BREMSER TIL LEDSAGER

Bremsehåndtagene er placeret bag ryglænet, under håndgrebene på højre og venstre side, og er forbundet med hjullåsen via et kabel.

- For at bremse skal du klemme bremsehåndtaget sammen, og for at slippe bremsen skal du slippe håndtagene. Udfør denne handling jævnt og med passende kraft.
- Bremsene er udstyret med en parkeringslås. For at aktivere den skal du tage fat i bremsehåndtaget, klemme det sammen og trække låseelementet ud.

JUSTERING AF PARKERINGSBREMSE

Korrekt låsning af parkeringsbremsen afhænger af dens justering og position. Hjullåsens håndtag skal være placeret således, at bremseklodsens blokerer hjulet sikkert, og håndtaget ikke yder overdreven modstand.

- Ved overdreven modstand skal håndtaget trækkes let fremad ved at løsne låseskruen, som er placeret på den anden side af parkeringsbremsen — fra kørestolens inderside. Indstil bremseklodsens i en position, hvor den let blokerer hjulet uden overdreven modstand.
- Hvis parkeringsbremsens bremseklods ikke rører ved eller ikke låser hjulet tilstrækkeligt, skal ovenstående instruktion følges ved at flytte håndtaget i den modsatte retning.

4. Før brug

Trin 1. Kontrol af kørestolens tilstand

Kontroller tilstanden af hjullåsene, konstruktionen og dækkene. Kontroller også, at de monterede komponenter er korrekt samlet og justeret. Brug ikke kørestolen, hvis der konstateres fejl eller mangler.

Trin 2. Aktivering af hjullåsene

Aktiver hjullåsene, når brugeren sætter sig i eller rejser sig fra kørestolen.

Trin 3. Indstilling af fodpladerne

Fodpladerne skal være i lodret position, når brugeren sætter sig i eller rejser sig fra kørestolen. Bemærk! Stå ikke på fodpladerne på grund af risiko for beskadigelse. Brug ikke fodpladerne som støtte, når brugeren sætter sig i eller rejser sig fra kørestolen, på grund af risiko for væltning og fald.

Trin 4. Indstilling af hjulene

Forhjulene skal være placeret i kørselsretningen.

Trin 5. At sætte sig i kørestolen

Kørestolen skal placeres så tæt som muligt på det sted, hvor brugeren skal skifte sæde. Kørestolen skal røre sengen eller det andet sæde, der anvendes, med baghjulet og den forreste del af rammen. Hvis brugeren ikke selv kan skifte sæde, skal brugeren flyttes over i kørestolen.

Trin 6. Udfoldning af fodpladerne

Når brugeren sidder i kørestolen, skal fodpladerne foldes ud parallelt med gulvet, så brugerens fødder hviler på fodpladerne under brug af kørestolen.

Trin 7. Korrekt brugerposition

Brugeren skal sidde oprejst, og knæene skal være bøjet i en vinkel på 90°.

Kørestolen er klar til brug.

5. Tekniske data

Sædemål: 43 / 46 x 41 cm	Samlet højde: 91 cm
Samlet bredde: 64 / 67 cm	Vægt: 11,73 / 11,78 kg
Samlet dybde: 106 cm	Maksimal belastning: 136 kg
Sædehøjde fra gulvet: 50 cm	Sammenfoldet bredde: 34 cm

Rammens farve: rød, grøn

6. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig intet ansvar for forkert brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne eller misbrug.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Vedligehold kørestolens komponenter regelmæssigt:

- Polsteret og puden kan rengøres med en fugtig — ikke våd — klud og koldt eller varmt vand uden brug af rengøringsmidler. Vanskelige pletter kan rengøres med en svamp. Polsteret må ikke gennemvædes for meget. Tørres væk fra varmekilder.
- Plastdele skal rengøres med en fugtig klud, eventuelt med brug af egnede rengøringsmidler til plastdele. I så fald skal producentens anvisninger og sikkerhedsforanstaltninger følges.

8. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

9. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

10. Hændelser med medicinsk udstyr

Enhver alvorlig hændelse, der involverer et medicinsk udstyr, skal rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor brugeren eller patienten har bopæl.

11. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Produktet opfylder Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige krav til medicinsk udstyr (MDR 2017/745).		

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026 (I)