


1. Eigenschaften

Das Bettgitter besteht aus langlebigem, pulverbeschichtetem Stahl. Es verfügt über höhenverstellbare Beine, einen Schaumstoffgriff, einen Befestigungsgurt für das Bett und eine kleine Tasche.

Das Set enthält: Mittelrahmenteile (2 Stk.), Unterrahmen mit Gurt, Beine mit Füßen (2 Stk.), Tasche, Mittelrahmenverbinder, Verriegelungsclip (2 Stk.), Oberrahmen mit Griff.

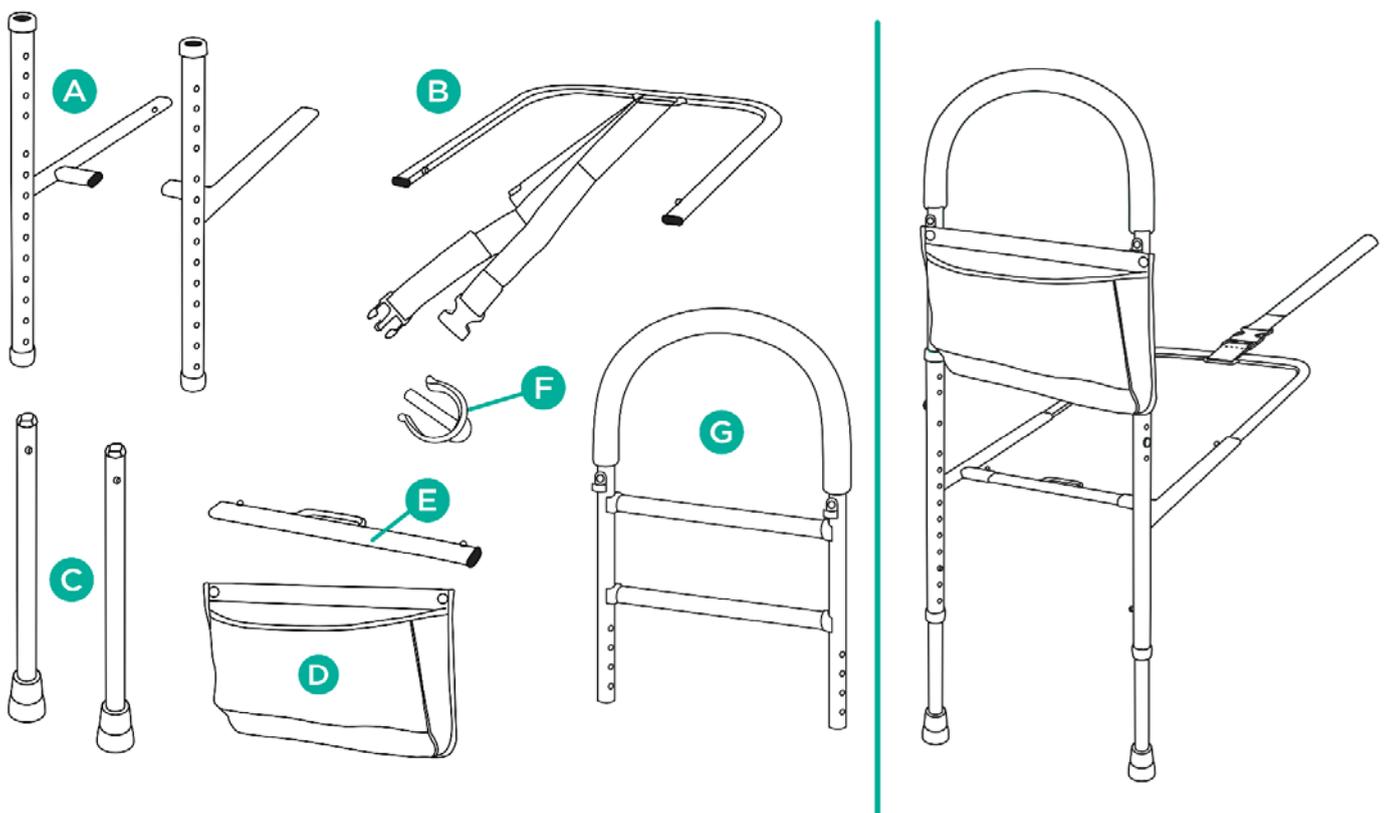

Elemente des Bettgitters:

A. Mittelrahmenteile mit Höhenverstellung

B. Unterrahmen mit Befestigungsgurt

C. Beine mit Gummifüßen

D. Tasche

E. Mittelrahmenverbinder

F. Verriegelungsstift zur Höhenverstellung des Griffs

G. Oberrahmen mit Schaumstoffgriff

2. Anwendung

Das Bettgitter dient als Unterstützung beim Aufstehen oder beim Wechsel von der Liege- in die Sitzposition im Bett. Es wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität empfohlen, die alltägliche Aktivitäten nicht selbstständig ausführen können. Das Gitter eignet sich sowohl für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen als auch zu Hause.

3. Montage


Schritt 1. Verbinden Sie die Mittelrahmenteile (A) mit dem Mittelrahmenverbinder (E) mittels Verriegelungsstiften.

Schritt 2. Verbinden Sie den Unterrahmen (B) mit dem Mittelrahmen (A) mittels Verriegelungsstiften.

Schritt 3. Montieren Sie die Beine (C) in die unteren Öffnungen der Mittelrahmenteile (A) und sichern Sie sie mit Verriegelungsstiften. Beide Beine sollten auf gleicher Höhe eingestellt sein.

Schritt 4. Montieren Sie den Oberrahmen (G) in die oberen Öffnungen des Mittelrahmens (A) und sichern Sie ihn beidseitig mit Verriegelungsclips (F). Achten Sie auf gleiche Höhe.

Schritt 5. Befestigen Sie das Bettgitter am Bettgestell und ziehen Sie den Gurt fest (Abbildung 1).

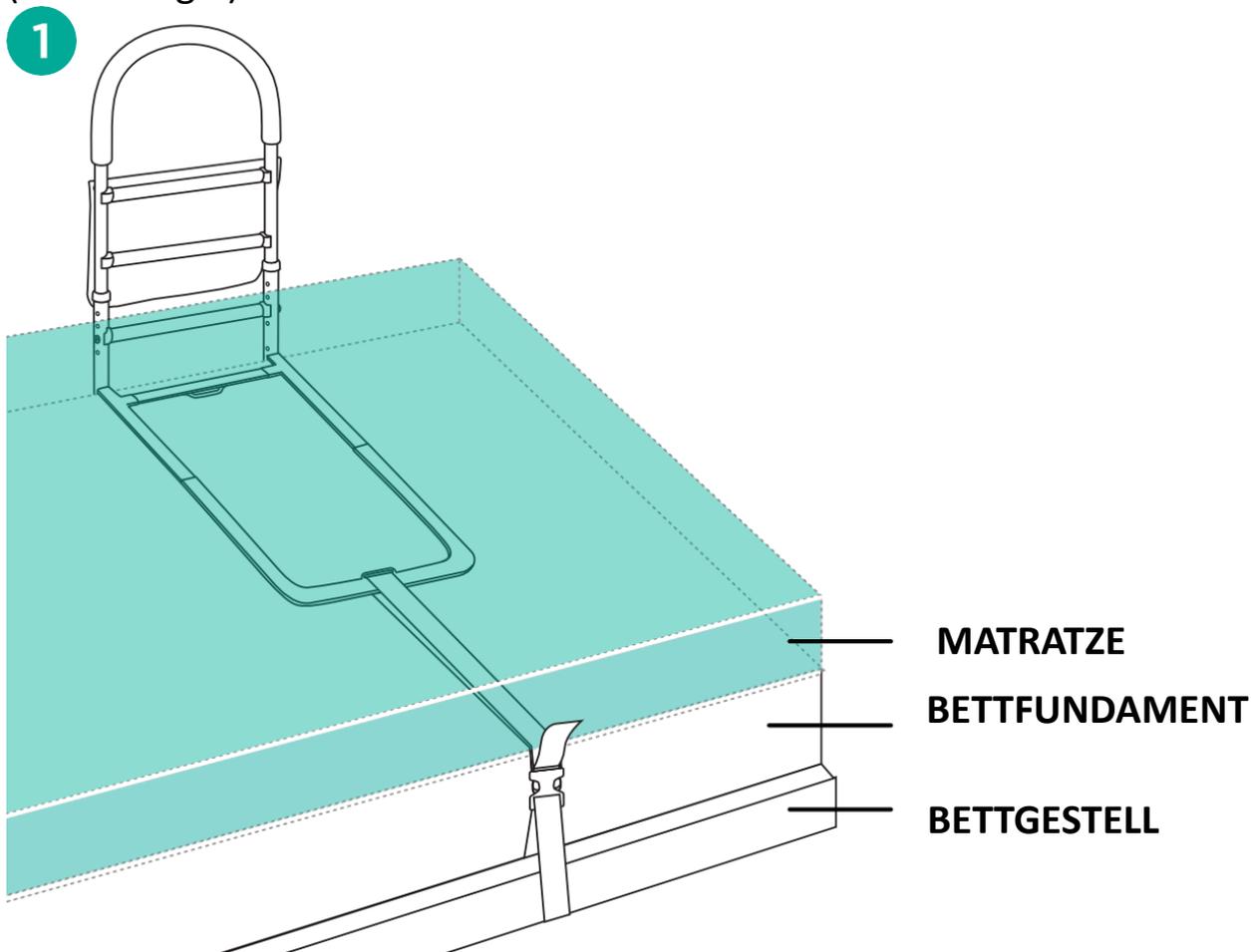

Schritt 6. Stellen Sie sicher, dass beide Beine den Boden berühren. Falls nicht, passen Sie die Höhe mit den Verriegelungsstiften an.

Schritt 7. Befestigen Sie die Tasche unter dem Griff am Oberrahmen (G) mit den daran angebrachten Clips.

Das Bettgitter ist einsatzbereit.

HÖHENVERSTELLUNG FÜR GRIFFE UND BEINE

- Zum Verstellen des Griffs entfernen Sie beidseitig die Verriegelungsclips, stellen Sie die gewünschte Höhe ein und sichern Sie den Griff wieder. Beide Seiten müssen auf gleicher Höhe sein.
- Zum Verstellen der Beine drücken Sie die Verriegelungsstifte an den Beinen und wählen die gewünschte Höhe. Beide Beine müssen auf gleicher Höhe sein.

4. Technische Daten

Gesamthöhenverstellung	89,5–112 cm
Gesamtbreite	37 cm
Gesamttiefe	74 cm
Höhenverstellung des Griffs*	52–60 cm
Gurtlänge	192 cm
Höhe des Unterrahmens vom Boden	30–55 cm
Maximale Tragfähigkeit	136 kg

* gemessen vom Unterrahmen bis zum Griff

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßen Gebrauch, Missachtung der Sicherheitsvorschriften oder Fehlanwendung.

6. Wartung

Reinigen Sie den Rahmen und die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel. Gründlich trocknen. Hartnäckige Flecken auf der Tasche können mit einem Schwamm entfernt werden.

7. Lagerungs- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte sind durch eine Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen finden Sie in der Garantiekarte auf unserer Website. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie den Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) für eventuelle Garantieansprüche auf.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	Chargennummer		UDI-Code
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Hinweis		Bitte lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller hat die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte überprüft.		

Unsere komplette Produktlinie ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Erfahren Sie mehr unter: www.timago.com. Vielen Dank, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



07/2025(I)