

# BENUTZERHANDBUCH

Schaummatratze mit waschbarem, dampfdurchlässigem Bezug

Produktcode: MOON-TIM



Vor der Verwendung des Produkts lesen Sie bitte diese Anleitung. Die Anleitung enthält Informationen, die für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sowie für dessen Pflege und Reinigung erforderlich sind. Die Verwendung des Produkts entgegen den Anweisungen kann zu ernsthaften Komplikationen führen. Die Anleitung sollte an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

## 1. Eigenschaften

Die Matratze besteht aus Polyurethanschaum und ist mit einem waschbaren, dampfdurchlässigen Bezug mit Reißverschluss ausgestattet.

## 2. Anwendung

Die Schaummatratze trägt zur richtigen Unterstützung des Körpers in den verschiedenen Bereichen der Wirbelsäule bei und beeinflusst zusätzlich die Regulation der Muskelspannung in Ruhe. Sie wird während der Behandlung, Rekonvaleszenz oder Rehabilitation sowie bei dauerhaft immobilisierten Patienten eingesetzt.

## 3. Gegenanzeigen für die Verwendung:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht zum Bettrahmen passt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer oder auf heißen Oberflächen. Dies kann zu schweren Verletzungen des Benutzers und zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

## 4. Hinweise



Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Wartung des Produkts, die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften oder unsachgemäße Verwendung.

- Die Haut an der Kontaktstelle sollte sauber sein.
- Es ist notwendig, den Zustand der Haut des Patienten regelmäßig zu überprüfen.

- Die Position des Benutzers sollte regelmäßig geändert werden, um die Bildung von Druckgeschwüren/Wunden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Geräte, die den Bezug beschädigen können.
- Die Matratze sollte an die Größe des Bettes angepasst werden.
- Achten Sie auf eine hohe Hygiene des Matratzenbezugs: reinigen und/oder waschen Sie ihn.
- Wenn das Produkt nicht mehr zur Verwendung geeignet ist, sollte es entsorgt werden. Vor der Entsorgung sollte das Produkt gereinigt werden, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
- Wenn infolge der Verwendung des Produkts unerwünschte Symptome auftreten, melden Sie dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer oder Patient ansässig ist.

## 5. Auspacken und Anpassen

- Öffnen Sie die Verpackung beim Erhalt der Matratze vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.  
Legen Sie die Matratze auf eine ebene Fläche und warten Sie, bis alle durch den Transport verursachten Verformungen ihre ursprüngliche Form wieder annehmen.
- Die Matratze sollte an das Bett des Patienten angepasst werden, um ihre Funktionen vollständig erfüllen zu können..

## 6. Technische Daten

PARAMETE	MOON-TIM
Länge	200 cm
Breite	90 cm
Höhe	10 cm
Maximale Belastung	100 kg

## 7. Reinigung und Wartung

- Waschen Sie die Schaummatratze nicht.
- Waschen Sie den Bezug nach dem Entfernen der Schaumstoffeinlage mit einem milden Reinigungsmittel bei Temperaturen bis zu 90°C.
- Der Bezug kann bei Temperaturen bis zu 120°C sterilisiert werden.

- Der Bezug kann mit bis zu 60 % Alkohol desinfiziert werden.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Chemikalien.
- Nicht chemisch reinigen.
- Verwenden Sie keine chlorhaltigen Chemikalien.
- Es wird empfohlen, den Bezug im ausgebreiteten Zustand zu trocknen.
- Vermeiden Sie starke Verschmutzungen.

## 8. Lagerungs- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 9. Garantieinformationen

Alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte sind durch eine Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen finden Sie in der Garantiekarte auf unserer Website. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie den Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) für eventuelle Garantieansprüche auf.



## REKLAMATIONEN SIND AUSGESCHLOSSEN BEI:

- Mechanischen Schäden (Abnutzung, Kratzer).
- Schäden durch normale Nutzung.
- Mängeln infolge einer falschen Anpassung der Matratze an das Bett.
- Mängeln infolge der Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen oder der Reinigungs- und Wartungsvorschriften.
- Verfärbungen des Bezugs.
- Benutzerkomfort.

## 10. Vorkommnisse mit Medizinprodukten

Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit einem Medizinprodukt muss dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union gemeldet werden, in dem der Benutzer oder Patient seinen Wohnsitz hat.

## 11. Labels

	Referenznummer		Hersteller
---	----------------	---	------------

	Chargennummer		Eindeutige Geräteidentifikation
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Hinweis		Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
	Verfallsdatum		Zulässige Lagertemperatur
	An einem trockenen Ort lagern		Vor Sonnenlicht schützen
	Verpackung ist recycelbar		Die Verpackung ist im Abfall zu entsorgen
	Das Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union für Medizinprodukte (MDR 2017/745).		

Unsere komplette Produktlinie ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Erfahren Sie mehr unter: [www.timago.com](http://www.timago.com). Vielen Dank, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



### Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



04/2026 (I)