

BENUTZERHANDBUCH

Rollstuhlkissen

Produktcode: SitWELL

Rollstuhlkissen

Produktcode: ErgoTIM



Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts. Die Anleitung enthält Informationen, die für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sowie für dessen Pflege und Reinigung erforderlich sind. Die Verwendung des Produkts entgegen den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung kann zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Die Anleitung sollte an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

1. Eigenschaften

Das Kissen besteht aus Polyurethanschaum und wird mit einem wasserdichten, dampfdurchlässigen Bezug mit Reißverschluss geliefert.

2. Anwendung

Das Kissen wird für die Verwendung in Rollstühlen, Sesseln, Stühlen oder Autos empfohlen. Es bietet Komfort, eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine gute Luftzirkulation und hilft so, Druckgeschwüren, Hämorrhoiden und Krampfadern vorzubeugen. Ideal für den täglichen Gebrauch und auf Reisen.

3. Kontraindikationen für die Verwendung:

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mit dem Rollstuhl kompatibel ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe offener Flammen oder auf heißen Oberflächen. Dies kann zu schweren Verletzungen des Benutzers und zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

4. Hinweise

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Wartung des Produkts, Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften und Missbrauch.

- Die Haut an der Verbindungsstelle sollte sauber sein.

- Der Zustand der Haut des Patienten muss regelmäßig überprüft werden.
- Die Position der Benutzer sollte regelmäßig geändert werden, um die Bildung von Wunden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und Geräte, die den Bezug beschädigen könnten.
- Das Kissen sollte an die Sitzgröße angepasst sein. Achten Sie auf eine hohe Hygiene des Kissenbezugs: reinigen und/oder waschen Sie ihn.

Wenn das Produkt nicht mehr für den Gebrauch geeignet ist, sollte es entsorgt werden. Vor der Entsorgung sollte das Produkt gereinigt werden, um das Risiko einer Kontamination auszuschließen.

Wenn durch die Verwendung des Produkts unerwünschte Symptome auftreten, melden Sie dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer oder Patient wohnt.

5. Auspacken und Anbringen

- Wenn Sie die Lieferung mit dem Kissen erhalten, öffnen Sie sie vorsichtig, um das Kissen nicht zu beschädigen.
- Legen Sie das Kissen auf eine ebene Fläche und warten Sie, bis sich alle während des Transports entstandenen Verformungen wieder zurückgebildet haben.
- Das Kissen sollte an den Sitz des Patienten angepasst werden, damit es seine Funktionen vollständig erfüllen kann.

6. Technische Daten

PARAMETER	MODELL	
	SitWELL	ErgoTIM
Länge	40 cm	40 cm
Breite	43/46 cm	46 cm
Höhe	5 cm	7 cm
Max. Tragkraft	120 kg	120 kg
Konstruktion	Perforierte Oberfläche	„Igel“-Oberfläche

7. Reinigung und Pflege

- Waschen Sie den Schaumstoffeinlage nicht.
- Waschen Sie den Bezug nach dem Entfernen der Schaumstoffeinlage in einem milden Waschmittel bei Temperaturen bis zu 90 °C. ° C.
- Der Bezug kann bei Temperaturen bis zu 120 °C sterilisiert werden.
- Der Bezug kann mit einer bis zu 60%igen Alkohollösung desinfiziert werden.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel oder Chemikalien.
- Nicht chemisch reinigen.
- Verwenden Sie keine chlorhaltigen Chemikalien.
- Es wird empfohlen, den Bezug in ungefalteter Form zu trocknen.
- Vermeiden Sie starke Verschmutzungen.

8. Lagerungs- und Transportbedingungen.

Das Produkt darf keiner direkten Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.



9. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der auf unserer Website verfügbaren Garantiekarte beschrieben sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN SIND:

- Mechanische Beschädigungen (Abrieb, Kratzer).
- Schäden, die durch natürlichen Gebrauch entstanden sind.
- Mängel, die auf eine falsche Größenauswahl des Sitzkissens zurückzuführen sind
- Mängel, die auf die Nichtbeachtung der Nutzungsbedingungen oder der Reinigungs- und Pflegeanweisungen zurückzuführen sind.
- Verfärbung des Bezugs.
- Komfort bei der Nutzung.

10. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
---	----------------	---	------------

	LOT-Nummer		Eindeutige Geräteidentifikationen
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Hinweis		Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
	Verwendungsdatum		Zulässige Lagertemperatur
	An einem trockenen Ort lagern		Vor Sonnenlicht schützen
	Verpackung ist recycelbar		Die Verpackung sollte im Hausmüll entsorgt werden
	Der Hersteller hat die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte überprüft.		



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



12/2025(I)